



Se hai bisogno di indicazioni sull'interpretazione dei risultati dei test genetici puoi consultare il Laboratorio Vetogene - ENCI Servizi:

Tel. 324 9924730 (da Lun a Ven 09:00-12:00; 14:00-17:00)
info@vetogene.com - www.vetogene.it/contatti

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEL KIT MyDogDNA™



Leggere attentamente quanto riportato all'interno di questo foglio illustrativo.

NESSUNA ATTIVAZIONE ONLINE È RICHIESTA!

BENVENUTO NELLA NUOVA GENERAZIONE DI TEST GENETICI
PER ALLEVARE IN MANIERA **RESPONSABILE** E **SOSTENIBILE**

Il Presidente di ENCI Servizi
Espedito Muto



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO MyDogDNA, IL KIT PER TEST GENETICI DIVERSIFICATI CON UN' UNICA ANALISI DEL DNA

MyDogDNA™ è stato progettato in partnership con **Wisdom Panel**, **Royal Canin®** e **Vetogene ENCI Servizi** per permetterti di conoscere i tuoi cani ad un livello più "profondo" e **migliorare la selezione riproduttiva** per una nuova generazione di cuccioli geneticamente più sani.

L'attivazione del kit è gestita direttamente dal **Laboratorio Vetogene – ENCI Servizi**.

- Recati dal tuo **Medico Veterinario** con la **certificazione di prelievo** che troverai allegata a questo foglio illustrativo.
- **Inserisci nella busta pre-affrancata** che trovi all'interno di questo kit i **2 tamponi salivari** insieme alla **certificazione di prelievo timbrata e firmata dal tuo Medico Veterinario**.
 - **Spedisci la busta** attraverso un qualunque **Ufficio Postale**.

Noi ci occuperemo di tutto il resto!

Riceverai tutti risultati direttamente via e-mail dal Laboratorio Vetogene – ENCI Servizi


L'anno di scadenza indicato sul retro del kit per il suo utilizzo è indicativo.



ISTRUZIONI D'USO PER IL MEDICO VETERINARIO




Il medico veterinario dopo aver verificato il numero del microchip del soggetto dovrà timbrare e firmare la **Certificazione di prelievo** contenuta nella stessa busta di queste istruzioni.

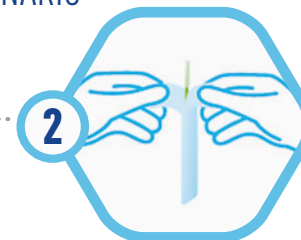

Aprire leggermente i lembi della confezione del tampone per circa 5 cm e conservarla per inserire i campioni dopo il prelievo (il prelievo va effettuato ad almeno 2 ore dall'ultima ingestione di cibo del cane).



Il Medico Veterinario effettua un **prelievo di cellule della mucosa orale** strofinando e ruotando le setole del tampone tra la guancia e la gengiva per circa 15 secondi.

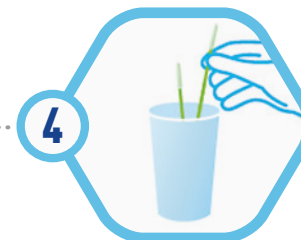

Lasciare asciugare il tampone all'aria per almeno 5 minuti. Per il secondo tampone, ripetere gli stessi passaggi (dal punto 2 al punto 4). Assicurarsi di utilizzare entrambi i tamponi sullo stesso animale.



Una volta asciutti, **inserire entrambi i tamponi nella confezione protettiva dal verso delle setole**.

Non occorre sigillare la confezione.

Scrivere il nome del proprietario e del cane sull'etichetta della confezione.



Riporre la confezione con i tamponi all'interno della busta bianca di reso prepagata in dotazione e sigillarla. Si prega di lasciare nella busta anche la bustina con il gel di silice. Scrivere il proprio nome sulla busta (Sender Name) e **spedirla per posta**.



**RICEVERAI I RISULTATI DIRETTAMENTE VIA E-MAIL
DAL LABORATORIO VETOGENE – ENCI SERVIZI**